

Guia para Carregadores - Slim RIC

-> Indicadores de carregamento do CARREGADOR

- Verde piscando: **CARREGANDO**
- Verde fixo: **bateria interna carregada**

(bateria interna tem capacidade para carregar aparelhos auditivos)

- Laranja fixo: **bateria interna não tem capacidade de carregar os aparelhos auditivos**
- Laranja piscando: **bateria descarregada ou fase de resfriamento**



-> Indicadores de carregamento do APARELHO AUDITIVO

- Laranja piscando: **fase de resfriamento, aguarde**
- Verde contínuo: **CARGA COMPLETA**
- Verde piscando: **CARREGANDO**



Leds vermelhos = ERRO, retire os aparelhos do carregador, retire o carregador da tomada e tente o carregamento novamente. Ou troque o receptor por um novo. Caso o problema persista contate o Suporte Técnico da Espaço da Audição.

-> Tempo de Carregamento:

- **30 minutos** de carregamento oferece uma média de **5 horas** de uso sem streaming e **3 horas** com streaming;
- **4 horas** para uma carga completa, que oferece uma média de **19hrs de uso ou 16hrs com utilização de streaming de 5hrs** o carregador pode ficar ligado na tomada, mesmo após o carregamento completo);



-> Coloque seus aparelhos para carregar diariamente. Na mesma posição que você vê na imagem ao lado, receptor encaixado dentro do orifício da case



-> Sugerimos também o uso diário do desumidificador;

-> **Liga/desliga é automático:** ao colocar os aparelhos no carregador os mesmos desligam e ao retirar os do carregador eles ligam automaticamente.

